

Auslesen Betriebsstunden iGO2

Auslesen Betriebsstunden mobiler Sauerstoffkonzentrator iGO2 & iGO2 Update

**iGo2 "alt":**

<ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist. • Drücken Sie alle drei Tasten gleichzeitig und halten Sie sie für ca. 2 Sekunden gedrückt. • Nach kurzer Zeit erscheint auf der Anzeige der Betriebsstundenzähler. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Der Betriebsstundenzähler besteht aus 5 Ziffern, die in drei Segmenten dargestellt werden. <p>Die Anzeige blättert automatisch durch die Segmente.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Um den Informationsmodus wieder zu verlassen, drücken Sie die Ein-Taste und lassen Sie diese nach 2 Sekunden los. 	

iGo 2 Update 2024:

- Gerät einschalten.



- Betriebsstundenanzeige beim Einschalten.



Alternative Möglichkeit für die Betriebsstundenabfrage:

Gleichzeitig die - / + & ON/Off Tasten drücken.



