

Auslesen Betriebsstunden Compact 525KS

Auslesen Betriebsstunden

Compact 525KS



- Stellen Sie sicher, dass das Gerät an einer funktionierenden Steckdose angeschlossen ist und schalten Sie dieses **EIN**.
- Je nach dem welches Modell der Compact 5 Reihe Sie nutzen, können Sie die Betriebsstunden entweder auf der Rückseite, unter der Filterklappe, oder über die digitale Anzeige an der Vorderseite wie folgt ablesen:

	
<p style="text-align: center;">C525KS bis R-Serie</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ JxxxxxxKS ○ RxxxxxxKS 	<p style="text-align: center;">1025KS und C525 B-Serie</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ BxxAxxxKS mit digitalen Stundenzähler (Achtung: Es gibt eine Kommastelle beim digitalen Stundenzähler)
	<ul style="list-style-type: none"> • beim C1025KS und C525KS ab der B-Serie wurde ein digitaler Stundenzähler verbaut.

- Drehen Sie den Konzentrator hier mit der Rückseite zu sich



- Der Stundenzähler befindet sich auf der Geräterückseite unter der Klappe, an der der Grobluftfilter angebracht ist



- Durch das Entfernen der Abdeckklappe lassen sich die Betriebsstunden des Konzentrators ablesen



- Er befindet sich im Bedienpanel, unter den Kontroll-LED's

