

## Auslesen Betriebsstunden EverFlo

### Auslesen Betriebsstunden Sauerstoffkonzentrator EverFlo




- 1 Stellen Sie sicher, dass das Gerät an einer funktionierenden Steckdose angeschlossen ist und schalten es an.

- 2 Bitte drehen Sie den Konzentrator mit der Seite des Typenschildes zu Ihnen



- 3 Direkt über dem Typenschild befindet sich der Betriebsstundenzähler. Bitte merken Sie sich diese Zahl und teilen uns diese mit.

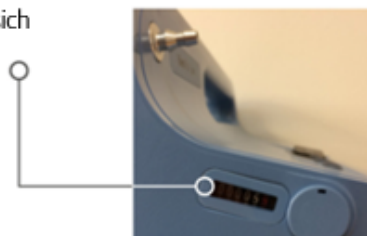

Die Betriebsstundenanzeige wird OHNE Nachkommastelle angezeigt