

*Auslesen Betriebsstunden InogenOne G5 / ROVE 6*Auslesen Betriebsstunden
Sauerstoffkonzentrator InogenOne G5 / ROVE 6

<ul style="list-style-type: none"> • Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die „Power“-Taste drücken. • Setzen sie die Nasenbrille auf, um Alarme wehrend des Auslesens zu vermeiden. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Wenn der Display an ist, drücken Sie die „Alarntaste“ und halten diese gedrückt bis der Bildschirm wechselt. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Im Display werden jetzt die Betriebsstunden in der obersten Zeile angezeigt. Darunter steht die Softwareversion. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Schalten sie das Gerät wieder aus, indem Sie 2x die „Power“-Taste bestätigen. 	