

Auslesen Betriebsstunden PrismaLine

Auslesen Betriebsstunden

PrismaLine

(Touchscreen)

Netzanschlussleitung mit dem Netzteil und der Steckdose verbinden. Die Betriebsstunden des Gerätes werden kurz angezeigt. Das Gerät schaltet in den Standby.


Aus dem Standby:



1. Drücken Sie die i-Taste oben rechts um in die Information zu gelangen



2. Durch Drücken der Pfeil-Rechts Taste gelangen wir auf die 2. Seite

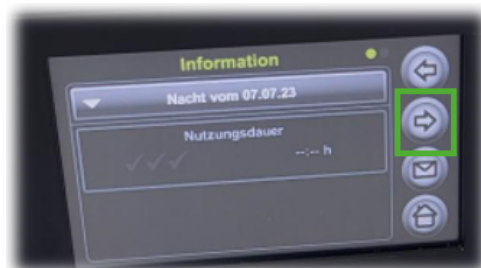

3. Drücken Sie auf "Gerät"



4. Unter der System Info erhalten Sie mit N4 die Betriebsstunden des Gerätes

