

Auslesen Betriebsstunden PrismaSmart & PrismaSoft

Auslesen Betriebsstunden PrismaSmart & PrismaSoft



Netzanschlussleitung mit dem Netzteil und der Steckdose verbinden. Die Betriebsstunden des Gerätes werden kurz angezeigt. Das Gerät schaltet in den Standby.

Ausdem Standby:

1. Menü-Taste drücken



2. Um das Info-Menü aufzurufen: i-Taste (-Taste) drücken



Die als erstes angezeigten Stunden sind die Gesamtbetriebsstunden des Patienten. Diese Stunden werden benötigt.

ANZEIGE	BEDEUTUNG
0000 h	Gesamtbetriebsstunden des Gerätes
1 d	Betriebsstunden für den letzten Tag.
7 d	Betriebsstunden für die letzten 7 Tage.
28 d	Betriebsstunden für die letzten 28Tage.
182 d	Betriebsstunden für die letzten 182 Tage.
366 d	Betriebsstunden für die letzten 366 Tage.