

Auslesen Betriebsstunden ResMed AirSense 10, AirCurve 10 und ResMed Lumis
Auslesen Betriebsstunden ResMed AirSense 10,
ResMed AirCurve 10, sowie ResMed Lumis



1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät an einer funktionierenden Steckdose angeschlossen ist
2. Schalten Sie bitte ihr Gerät über die "EIN-Aus-Taste" an der Oberseite ein. Schalten Sie gleich im Anschluss daran das Gerät wieder aus
3. Auf der Anzeige werden verschiedene Werte angezeigt. Bitte merken Sie sich die Zahl bei "Gesamtnutzung" und teilen Sie uns diese mit. Sollte die Gesamtnutzung nicht auf Anhieb zu lesen sein, so drehen Sie am Bedienregler rechts bis die Zeile in der Anzeige erscheint
4. Zurück zur Startseite gelangen Sie, indem Sie einmal die "Haus-Taste" drücken

