

Auslesen Betriebsstunden SimplyGo mini


Auslesen Betriebsstunden

SimplyGo mini

Sie können den Hauptschalter betätigen oder einfach die schwarze Bildschirmanzeige am Gerät berühren, um Ihre Einstellungen schnell zu überprüfen.



Der hier gezeigte Bildschirm mit den folgenden Informationen erscheint:

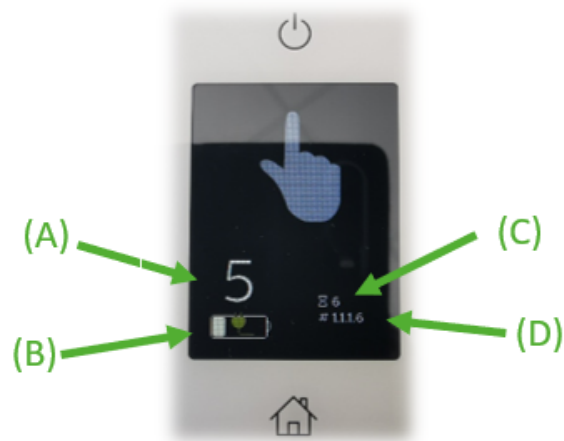

- A. O2-Einstellungen
- B. Akkukapazität
- C. **Betriebsdauer des Gerätes in Stunden (Sanduhr + Stunden) Es gibt keine Kommastelle.**
- D. Version der Software

Der Bildschirm wird sich automatisch nach 5 Sekunden ausschalten