

Auslesen Betriebsstunden prismaVent Löwenstein Medizintechnik

# Auslesen Betriebsstunden

## Löwenstein Medical Technology prismaVent



① Stellen Sie sicher, das das Gerät an einer funktionierende Steckdose angeschlossen ist und schalten Sie es EIN

② Das Gerät sollte sich dann in der nebenstehenden Bildschirmsicht befinden, anderenfalls einmal kurz die Taste mit dem Haus Symbol drücken



③ Mittels drücken der Report-Taste gelangt man in die Reportansicht



④ Navigieren Sie mit dem Drehknopf auf den Listeneintrag „Gerätenutzung“ und rufen Sie diesen durch kurzes Drücken des Drehknopfes auf.



⑤ In der sich dann öffnenden Ansicht ist in der 1. Zeile die Betriebszeit des prismaVent Beatmungssystems aufgeführt