

Geräte der schlafbezogenen Atmungstherapie

Atmungstherapiegerät

- Wöchentlich: Sichtkontrolle des Filters und bei Bedarf bitte reinigen
- Wöchentlich: Reinigung des Beatmungsschlauchs in einer milden Seifenlauge und mit klarem Wasser nachspülen
- Spätestens alle 6 Monate: Wechsel des Filters

Atemgasbefeuchter

- Zum Befüllen der Befeuchterkammer bitte stilles, kalkarmes Wasser verwenden.
- Das Wasser der Befeuchterkammer täglich wechseln
- Wöchentlich: Befeuchterkammer gründlich reinigen und bei Bedarf entkalken

Maske

- Maske täglich mit einem feuchten Tuch abwischen
- Wöchentlich: Maske gründlich in einer Seifenlauge (kein Geschirrspülmittel) reinigen

Verbrauchsmaterialien

Neue Verbrauchsmaterialien können unter 09193 – 507 106-90 oder per E-Mail an info@novamed.de bestellt werden.

nova:med

nova:med GmbH & Co. KG
Schwarzenbacher Ring 5
91315 Höchstadt

Telefon: 0 91 93/507 106 - 0
Fax: 0 91 93/507 106-50

E-Mail: info@novamed.de
www.novamed.de