

Sauerstoff- konzentrator

Empfehlung zur Anwendung

- Alle 2 Wochen an der Rückseite des Sauerstoffkonzentrators die Lüftungsschlitze absaugen
- Alle 4 Wochen die Nasenbrille entsorgen und durch eine Neue ersetzen.
- Alle 12 Monate den Sauerstoffverbindungsschlauch entsorgen und erneuern
- Bei Erreichen des aufgedruckten Verfallsdatums das Feuerschutzventil entsorgen und erneuern

Verbrauchsmaterialien

Neue Verbrauchsmaterialien können unter 09193 – 507 106-90 oder per E-Mail an info@novamed.de bestellt werden.

Technischer Service

nova:med wird sich zur Vereinbarung eines Wartungstermins Ihres Gerätes gemäß den Herstellerangaben mit Ihnen in Verbindung setzen.

nova:med

nova:med GmbH & Co. KG
Schwarzenbacher Ring 5
91315 Höchstadt

Telefon: 0 91 93/507 106 - 0
Fax: 0 91 93/507 106-50

E-Mail: info@novamed.de
www.novamed.de